

Powiększanie Penisa za pomocą
urządzenia PenisPlus+



wydane przez Penis.com.pl 2005 ©

SPIS TREŚCI

WSTĘP	
BUDOWA PENISA	
Na czym polega erekcja?	
Wielkość członka męskiego	
PRODUKT	
KORZYŚCI	
ZAKŁADANIE	
ZASADA DZIAŁANIA	
BADANIA	
PYTANIA	
REFERENCJE	

WSTĘP

Zanim zaczniemy, chciałbym Ci podziękować za pobranie tego ebooka. Jeśli po niego sięgnąłeś, to znaczy, że nie jest Ci obojętne szczęście seksualne Twojej Partnerki i Twoje. Zrobię wszystko co w mojej mocy, aby rozwiązać wszelkie Twoje wątpliwości na temat powiększania penisa. Na końcu ebooka znajdziesz dane kontaktowe. Nasi konsultanci odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania, przez 7 dni w tygodniu.

Zacznijmy od pytania, które zadaje sobie każdy mężczyzna:

Jak duże znaczenie ma rozmiar penisa?

Wiele firm sprzedających preparaty lub urządzenia powiększające penisa wynajduje coraz to nowsze dowody na to, że wielkość penisa ma ogromne znaczenie. Dowody te są w większości prawdziwe. Ja jednak wolałbym, żebyś Ty sam zdecydował jak ważna jest wielkość Twojego Penisa, gdyż na dobrą sprawę jest to sprawa bardzo indywidualna. Nie myśl, że duży Penis rozwiąże raz na zawsze wszystkie Twoje problemy seksualne.

Zawsze gdy ktoś pyta mnie o znaczenie wielkości odpowiadam takim oto porównaniem:

Z dużymi i małymi penisami jest tak jak z dobrymi i słabymi samochodami. Nie wystarczy 300koni pod maską, żeby być najlepszym kierowcą rajdowym. Równie ważne jest doświadczenie, technika, umiejętności, wyczucie, itp. Mocny samochód w rękach początkującego kierowcy może być niebezpieczny, jeśli ten nie będzie go prawidłowo używał. Nie zmienia to jednak faktu, że będąc kierowcą przysłowiowego „Malucha“ – ciężko jest osiągnąć lepsze wyniki od kierowcy sportowego BMW...

Powiększenie penisa – sekretne marzenie większości

Zapytaj kogośkolwiek ze swoich znajomych, czy chcieliby powiększyć swojego penisa. Zapytaj którąkolwiek ze swoich koleżanek, czy chciałyby aby jej Partner miał większego Penisa. Wiesz jakie będą odpowiedzi? W zdecydowanej większości padnie odpowiedź „Nie!”. Ale nie będzie to szczerą odpowiedzią. Skąd ta pewność? Z prostego eksperymentu: Na początku działalności rozesłaliśmy link do naszej strony kilkudziesięciu znajomym, którzy nie wiedzieli o naszej działalności. Każdy z nich zaśmiał się i powiedział „mnie to nie dotyczy” lub „ja nie potrzebuję”, ale licznik wejść na stronę mówił zupełnie co innego... Pewnie część z nich zajrzała tylko z ciekawości ale wielu z nich dokonało zakupu w ciągu tygodnia od obejrzenia strony! Również z ciekawości?

Nauczyliśmy się akceptować siebie takimi jakimi jesteśmy – i bardzo dobrze! Należy jednak być świadomym tego, że to nieprawda, że do końca życia jesteśmy skazani na to czym obdarzyła nas natura. Dzisiejsza medycyna wynalazła mnóstwo technik operacyjnego i bezoperacyjnego powiększania penisa. Najskuteczniejsze i najpopularniejsze z nich opisujemy na naszych stronach <http://www.Penis.com.pl/powiekszenie>

Statystyki

Prawie żaden mężczyzna o tym nie mówi, ale do 66% mężczyzn czuje, że:

- ich penis jest zbyt mały według nich
- ich penis jest obiektywnie zbyt mały
- chce należeć do grona „tych z dużymi” w saunie, pod prysznicami czy na plaży
- chce wyglądać bardziej atrakcyjnie dla swoich partnerek
- chce wypróbować pozycji, które nie są dostępne dla małych rozmiarów penisa
- większy penis jest bardziej efektowny wizualnie
- chce lepiej stymulować swoją partnerkę

Jak wielu mężczyzn chciałoby wydłużyć lub pogrubić swojego penisa?

79,4% życzyłoby sobie dłuższego penisa. Wielu także chciałoby, żeby był on grubszy.

77,8% chciałoby zwiększyć obwód swojego penisa. 77,5% uważa, że wielkość penisa ma znaczenie dla kobiet.

Czy posiadanie zakrzywionego penisa jest normalne?

Kształt penisa także liczy się dla mężczyzn: tylko 35% posiada prostego penisa, a 55,85% chciałoby, żeby był prosty.

Powiększanie penisa jest istotne zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn.

BUDOWA PENISA

Wraz z jądrami penis tworzy zewnętrzne narządy płciowe. Penis to narząd przypominający giętką rurkę. Składa się z wiązadła wieszadłowego znajdującego się w podbrzuszu (to właśnie ta część jest rozciągana za pomocą urządzenia PeniMaster), trzonu członka i wierzchołka. Członek pokryty jest miękką skórą, która zbiega się na żołądzi tworząc szparę. Ta część skóry nazywana jest napletkiem. W przedniej części żołądzi znajduje się ujście cewki moczowej. Ujście cewki moczowej służy do wydalania moczu i plemników.

W środku członka znajdują się struktury gąbczaste, które w czasie pobudzenia seksualnego wypełniają się krwią, dzięki czemu członek staje się sztywny i jednocześnie powiększa swoją objętość stercząc do przodu. Napletek zsuwa się do tyłu i żołądz jest całkowicie widoczna. Z powodu szybszego krążenia krwi kolor żołądzi zmienia się na fioletowy lub czerwony.

Na czym polega erekcja?

W czasie erekcji naczynia krwionośne ulegają rozszerzeniu, dzięki czemu krew wpływa do członka. Krew (na zdjęciu termicznym zaznaczona na czerwono) wpływa do tkanki gąbczastej W momencie wypełnienia członka krwią następuje erekcja.

Za erekcję odpowiedzialny jest układ nerwowy przywspółczulny. Erekcja następuje w czasie penetrowania w okolicach członka lub innych wrażliwych części ciała mężczyzny. Podobnie zdjęcia erotyczne, zapachy, a nawet dźwięki i, oczywiście, marzenia erotyczne mogą spowodować otwarcie się naczyń krwionośnych układu nerwowego i w konsekwencji erekcję.

We wczesnym dzieciństwie erekcje następują już w czasie snu. Zjawisko "nocnego nabrzmiwania członka" następuje w fazie szybkiego ruchu gałek ocznych (REM) (w czasie snu gałki oczne przesuwają się szybko przy zamkniętych powiekach) i trwa około 100 minut w ciągu nocy. Przykładem tego zjawiska jest przebudzenie się rano z erekcją.

Wielkość członka męskiego

W latach 1938 do 1963 **Instytut Kinsey'a** przeprowadził słynne, zakrojone na szeroką skalę badania na temat seksualności obejmujące również pomiary wielkości członków. Pomiary przeprowadzono u kilku tysięcy mężczyzn. Te badania dały rewolucyjne wyniki na temat seksualności i pozwoliły odpowiedzieć na wiele pytań, których nigdy wcześniej nie zadawano. Ustalono, że **średnia długość członka w stanie wzwodu wynosi 15,5 do 16 centymetrów**. Na podstawie przeprowadzonych badań Kinsey ustalił, że u 35,8 procent mężczyzn, u których przeprowadzono pomiary, **obwód członka wynosi 11,3 do 12,5 centymetrów** (mierząc u podstawy członka).

Te dane liczbowe nadal są uważane za aktualne, ale należy wziąć pod uwagę, że z powodu lepszego sposobu odżywiania się ludzi, średnia wielkość ciała stale rośnie. Do tej pory nie udowodniono jednak, czy członek zwiększa się w taki sam sposób jak reszta ciała i czy jego wielkość i obwód są większe niż wtedy. Dane uzyskane na podstawie badań amerykańskich, które wskazują, że u 24,6 procent mężczyzn długość członka wynosi 15,96 centymetrów, zdają się potwierdzać tę tendencję.

Mimo, iż nie dysponujemy dowodami potwierdzającymi ten fakt, wydaje się, że w przypadku mężczyzn zamieszkujących Europę Środkową średnia długość członka jest większa niż u Azjatów, których członek jest średnio o około 1,5 centymetra krótszy, ale mniejsza niż u Afrykańczyków, których członek jest średnio o około 1,5 centymetra dłuższy.

Prawidłowy sposób mierzenia wielkości penisa

Niektóre członki są proste, zaś niektóre zakrzywione, np. w górę. Można się spierać, czy zakrzywienie, które powoduje zmniejszenie długości członka o promień krzywizny, należy brać pod uwagę, czy też pominąć.

W celu umożliwienia obiektywnego porównania długości członków o różnych kształtach i prawidłowego ustalenia długości, o jaką członek został powiększony, eksperci stosują metodę, według której długość członka mierzy się w stanie pełnej erekcji bez uwzględniania jego kształtu.

Linijkę należy przyłożyć do penisa blisko brzucha nie naciskając przy tym na brzuch. Pomiar wykonuje się z tego punktu aż do zakończenia żołędzi.

Pomiary penisa w stanie spoczynku (zwiotczenia) u tej samej osoby zwykle dają zupełnie inne wyniki, ponieważ długość członka, zwłaszcza w stanie spoczynku, bardzo się różni. Istnieje wiele powodów takiego stanu rzeczy, np. temperatura członka, stres, stan psychiczny. Wszystkie te czynniki mają wpływ na obieg krwi w członku w stanie spoczynku. Zjawisko małego członka wywołane stresem jest szczególnie irytujące, ponieważ członek mężczyzny, który wraz z innymi mężczyznami bierze prysznic, może ulec znacznemu zmniejszeniu. Dzieje się tak z powodu tego, że mężczyzna jest zestresowany faktem, że jego członek może okazać się zbyt mały.

W związku z tym pomiar długości członka w stanie spoczynku należy przeprowadzać często w różnych porach dnia, a następnie obliczyć średnią tych pomiarów. Czasami w przypadku pomiaru sztywnego członka również można uzyskać różne wyniki, ale w większości przypadków, jeżeli pomiar jest przeprowadzany przy pełnym wzwodzie, różnice są milimetrowe.

Pomiar obwodu (grubości) członka zwykle przeprowadza się u podstawy członka (to znaczy w miejscu, w którym członek wchodzi do wnętrza ciała), tak jak robił to Instytut Kinsey'a, lub w połowie długości (w środku) członka.

PRODUKT



Opis:

1. Pierścień pokryty pianką gumową do założenia na członka
2. Elastyczny pas do zawiązania wokół pasa
3. Zapinka dopasowująca pas do indywidualnych potrzeb
4. Pętla wykonana z silikonu o jakości stosowanej w medycynie do zamocowania wokół żołądździ członka
5. Zapięcie zatrzaskowe do otwierania lub zamykania zatyczki
6. Zatyczka do dopasowywania pętli
7. Nylonowa płytką z otworami po bokach (A + B)
8. Elastyczne linki, każda z haczykiem do zamocowania w otworach (A +B)
9. Czarny pierścień silikonowy przy podstawie pętli, do dokładnego dopasowania wokół żołądździ członka.

Wszystkie zastosowane materiały wykonane są z przyjaznego dla skóry nylonu, silikonu medycznego i włókien nie zawierających formaldehydu.

KORZYŚCI

Chcielibyśmy zaznajomić Ciebie z urządzeniem PENISPLUS+, abyś również Ty mógł osiągnąć pożądaną sukces.

Korzyści ze stosowania PENISPLUS+

- dowolnie regulowana siła naciągająca
- nie zawiera twardych materiałów
- nie zawiera sztywnych mechanizmów
- nie wymaga prętów ani techniki teleskopowej
- jest bezkompromisowy
- PENISPLUS+ jest miękki, nie powoduje bólu i ma udowodnioną skuteczność
- nie trzeba go zdejmować, jeżeli konieczne jest przerwanie jego stosowania, na przykład w celu oddania moczu
- niedostrzegalny nawet pod obcisłym ubraniem, jak np. dżinsy
- w pełni skuteczny, nawet jeżeli stosuje się go w pozycji siedzącej
- odpowiedni dla każdego rozmiaru penisa i rozmiaru żołądzi
- roczna gwarancja



ZAKŁADANIE

PenisPlus+ jest prosty w użyciu. Będziesz zaskoczony, jak szybko uda Ci się zastosować PenisPlus+, delikatną metodę wydłużania członka. Prosto, szybko i dyskretnie!

PENISPLUS+ można nosić całkowicie dyskretnie pod codziennym ubraniem wywierając stałe naciąganie członka. Trzon i ciałka jamiste są połączone z elastyczną taśmą, która owinięta jest wokół pasa. Poprzez skracanie lub wydłużanie miękkiego paska można indywidualnie dopasować siłę naciągającą.

Podczas stosowania urządzenia, członek leży wygodnie z boku blisko brzucha.



PENISPLUS+ może być stosowany dla wszystkich wymiarów członka lub żołądzi. Poprzez pobudzenie uzyskuje się oddzielenie komórek tkanek i zwiększa się powstawanie nowych komórek. W ten sposób członek wydłuża się i powiększa obwód, nie tracąc jednak przy tym na grubości.

Wielu mężczyzn, którzy zastosowali PENISPLUS+ donosi o niezwykle zwiększonej wrażliwości seksualnej w obrębie ciał jamistych.



Należy pętlę pokrytą pianką gumową (1) na trzon prącia aż do włosów łonowych i mocno przytrzymać pętlę jedną ręką. Drugą ręką należy naciągnąć elastyczny pas (2) do tyłu wokół talii i nad drugim biodrem ku przodowi, tak, żeby pętla (4) była ustawiona naprzeciwko żołądź prącia



Następnie należy zabezpieczyć linki naciągające (7) po obu stronach płytki nylonowej (6). Pozycje zaznaczone są przy pomocy białych kropek (a + b). Dwa końce pasa (1 + 6) są teraz połączone za pomocą haczyków (a + b)



Czasami pomocne jest „wydojenie” prącia przy pomocy ręki od linii włosów do jego końca w celu poprawy przepływu krwi przez żołądź. Pętla silikonowa (4) będzie teraz łatwiejsza do dopasowania



Odciągnąć napletek (jeżeli dotyczy) z żołądź prącia. Należy zwilżyć śliną puste wgłębienie poniżej uwypuklenia żołądź i włożyć ostrożnie pętlę (4) do zagłębienia pomiędzy trzonem i głową prącia. Jeżeli zostanie odpowiednio dopasowana, pętla powinna okrążyć głowę prącia u jego podstawy



Teraz należy pociągnąć mały pierścień (9) przymocowany do podstawy przejrzystej pętli (4), w kierunku spodniej części żołądźki prącia, dopóki pętla umiejscowiona za wypukleniem żołądźki nie zostanie dokładnie dopasowana. Następnie można docisnąć pętlę silikonową (4) poprzez pociągnięcie jej końców

Zapięcie zatrzaskowe (5) znajduje się na końcu zatyczki zamykającej pętlę silikonową. W celu zwolnienia zatyczki należy nacisnąć zapięcie. Następnie należy pchnąć zatyczkę w kierunku nylonowej płytki i zwolnić zapięcie zatrzaskowe, które unieruchomi zatyczkę (6)

Pętla teraz trzyma mocno. Należy powtórzyć tą samą procedurę dla drugiej pętli. Trzeba uważać, aby nie „zadzierzgnąć” żołądźki prącia. Jeżeli żołądź wyslizguje się, oznacza to, że napięcie jest zbyt duże. Można je precyzyjnie dopasować poprzez popychanie małego czarnego pierścienia w kierunku spodniej stronie żołądźki. Nie będzie ona więcej wyslizgiwać się z pętli

Płytkę nylonową powinna leżeć płasko naprzeciwko ciała. Twój członek znajduje się we właściwej pozycji, jeżeli patrząc w dół widzisz jego bok

Należy poluzować linki naciągające



zabezpieczone wcześniej przy pomocy haków w (A) i (B). Należy pociągnąć jedną z linek naciągających, dopóki hak na drugim końcu nie uchwyci pasa i zabezpieczyć drugi koniec nylonowej płytki A lub B. Utworzy to bezpieczną linię, która zapobiegnie przed wyslizgnięciem się pasa ku tyłowi, jeżeli żołądź wysunie się z pętli



Kiedy już PENISPLUS+ zostanie zamocowany, należy skrócić pas (2) przy pomocy zapięcia (3), do momentu osiągnięcia słabego napięcia



Na koniec należy owinać pas wokół talii, tak aby nie przeszkadzał podczas siadania. Teraz żołądź nie wysunie się przy siadaniu



Kierunek pociągania należy zmieniać co dwa dni poprzez dopasowywanie PENISPLUS+ na zmianę na lewą lub na prawą stronę. To zapewni równomierne rozciągnięcie tkanki prącia

ZASADA DZIAŁANIA

Rozciąganie części ciała to tradycyjny zwyczaj u ludzi, którzy wciąż żyją w naturalnym środowisku.

PENISPLUS+ działa zgodnie z zasadą, która musi wydawać się sensacją dla naszej zachodniej cywilizacji, chociaż jest ona stosowana przez ludy pierwotne od wieków.



Tło historyczne:

Ciało ludzkie dysponuje mechanizmem, który umożliwia wzrost nowych komórek tkanki w przypadku silnej stymulacji, w celu ochrony przed możliwymi uszkodzeniami i urazami. Ten mechanizm został po raz pierwszy poznany przez ludy pierwotne i zastosowany do celów kultu, takich jak wydłużanie uszu, warg oraz do wydłużania prącia. Można na co dzień obserwować ten cudowny mechanizm u osób z nadwagą, u których powierzchnia ciała wzrasta wielokrotnie z powodu wielkiego przyrostu ciężaru ciała. Nie prowadzi to do ścięczenia tkanki skóry. Jeżeli więc taka osoba straci znacząco na wadze, tkanka skórna będzie z niej zwisać jak „obrus”. Ciało nie jest w stanie „wciągnąć” tkanki. Nowoczesna medycyna wykorzystuje proces rozciągania tkanki skóry na grzbiecie i w rejonie biodra w celu uzyskania „obrusów” skóry do jej przeszczepiania.

PENISPLUS+ wykorzystuje tę starożytną i skuteczną technikę wraz ze współczesną technologią, uzyskując w ten sposób metodę bezbolesnego wydłużania prącia bez konieczności wykonywania zabiegu chirurgicznego.

Plemię Karamojongów z północnej Ugandy oraz święci fakirzy indyjscy potrafili przy użyciu ciężarków osiągnąć długość prącia do 45 centymetrów (na podstawie Encyklopedii Britannica i STERN Nr 49/95). Tylko od ciebie zależy, czy postawisz sobie taki ambitny cel. W każdym razie to jasno udowadnia zasadność idei, którą zastosowano w PENISPLUS+.



BADANIA

Przeprowadzono badanie testowe między 15 października 2000 a 15 stycznia 2001*

Wzrost rozpoczął się już po kilku tygodniach.

PENISPLUS+ gwarantuje wygodę i dyskrecję.

Przy rozciąganiu przez 3 - 4 godziny dziennie, wzrost inicjowany jest już po kilku tygodniach. Jeżeli urządzenie stosuje się regularnie, pożądany efekt jest widoczny i może zostać zmierzony. Ty sam zdecydujesz o długości swego członka poprzez długość stosowania metody.

Wiek osoby	Długość penisa przed**	Długość penisa po**	Przyrost**
25	10,1 cm	13,0 cm	2,9 cm
39	14,3 cm	17,0 cm	2,7 cm
53	17,3 cm	19,5 cm	2,1 cm
57	8,5 cm	11,3 cm	3,2 cm
59	17,0 cm	19,4 cm	2,4 cm

*PENISPLUS+ stosowano przez 3-4 godziny dziennie.

**Pomiarów dokonywano w stanie zwiotczenia, ponieważ wyniki pomiarów różnią się w zależności od fazy wzwodu. Wzrost jest również widoczny i możliwy do zmierzenia w stanie wzwodu.

PENISPLUS+ może być noszony pod ubraniem i nie przeszkadza w siadaniu czy uprawianiu sportu. Będziesz wiedział o jego istnieniu, ale niemal go nie poczujesz, a nikt inny nie zauważy twojego małego sekretu.

PYTANIA

1. Na jakiej zasadzie oparte jest działanie PENISPLUS+?

PENISPLUS+ działa w oparciu o zasadę, która jest sensacją dla naszej zachodniej cywilizacji, chociaż ideę tą stosowały ludy pierwotne przez wieki. Osiągali to przez trwające lata przymocowywanie ciężarków do członka.

Dzięki temu stałemu, bezbolesnemu rozciąganiu, członek jest dosłownie wyciągany z wnętrza ciała, to pobudza oddzielenia się komórek tkanek i zwiększa powstawanie nowych komórek. Członek jest wydłużany poprzez wyciągnięcie go z ciała.

2. Czy ta zasada jest znana w naukach medycznych?

Tak. Wiadomo, że pobudza oddzielanie się komórek tkanki i zwiększa powstawanie nowych jej komórek.

3. O ile centymetrów można wydłużyć członka stosując PENISPLUS+?

Teoretycznie do 40 - 45 centymetrów. W plemionach Karamojongów i Nuba w Afryce Środkowej mierzone członki miały długości do 45 centymetrów, i jest to dobrze udokumentowane (STERN z 30 Listopada 1995, numer 49). Nie spodziewaj się jednak aż takich rezultatów jeśli nie zamierzasz stosować urządzenia od dzieciństwa, kilka godzin dziennie. Średni przyrost osiągany przez Europejczyków w wieku 20 - 45lat to 2,1 – 3,8 cm.

4. Czy członek jest wydłużony nawet w stanie zwiotczenia?

Członek jest oczywiście wydłużony także w stanie zwiotczenia. Tak, jak w przypadku sprężyny, rozciągnięty członek nie powraca do swojej oryginalnej pozycji.

5. Jak często należy stosować PENISPLUS+?

PENISPLUS+ należy stosować codziennie przez co najmniej 3-4 godziny. Dłuższe stosowanie przyspieszy uzyskanie wyniku.

6. Czy osiągnięte wyniki są trwałe?

Jeżeli czas stosowania urządzenia wynosi co najmniej 8 miesięcy, wynik jest trwały. Ciało ma tendencję do powrotu do oryginalnych rozmiarów, jeżeli czas stosowania jest poniżej sześciu miesięcy.

7. Czy istnieje ograniczenie wiekowe stosowania PENISPLUS+?

PENISPLUS+ może być stosowany w każdym wieku.

8. Czy stosowanie PENISPLUS+ może mieć wpływ na erekcję?

PENISPLUS+ działa silnie pobudzająco na ciała jamiste. Stają się one bardziej wrażliwe.

Wielu klientów opisuje bardziej zmysłowe erekcje.

9. Czy poprzez wydłużanie członek staje się cieńszy?

Członek staje się nawet grubszy na wysokości ciał jamistych na skutek wydłużania.

Spowodowane jest to nieznacznie zwiększonym ciśnieniem wewnętrznym, będącym wynikiem wolniejszego powrotu krwi z gruczołów do ciała, co z kolei prowadzi do pobudzenia wzrostu tkanki ciał jamistych.

10. Czy istnieje jakaś minimalna wymagana wielkość członka w stanie zwiotczenia?

U niektórych mężczyzn żołądź nie jest bardzo wyraźnie rozwinięty. Wybrzuszenie pomiędzy końcówką a trzonem nie jest wystarczająco duże, aby bezpiecznie utrzymać pętlę silikonową. Istnieje ryzyko, że pętla ta może ześlizgnąć się w trakcie stosowania urządzenia. W takich przypadkach zalecamy urządzenie Phallosan złożone z mankietów z przyssawkową końcówką. To urządzenie może być również pomocne w przypadku „mikropenisu”.

11. Jaka jest różnica pomiędzy wydłużaniem członka przy zastosowaniu PENISPLUS i wydłużaniem operacyjnym?

Poprzez rozciąganie ścięgien i tkanki, PENISPLUS+ pobudza ciało do tworzenia nowych komórek. Ciało ludzkie wykorzystuje ten proces jako sposób ochrony przed możliwymi uszkodzeniami i urazami. W przypadku zabiegu operacyjnego ścięgna przymocowujące pracę do dolnej części kości miedniczej są przecinane i ponownie łączone w nieco niższym położeniu. Prącie jest nieco wyciągnięte z ciała.

12. Czy jest jakaś różnica pomiędzy stosowaniem PENISPLUS+ a stosowaniem pompki próżniowej?

PENISPLUS+ można niepostrzeżenie nosić w ciągu dnia pod ubraniem. Nawet, kiedy siedzisz, efekt nie ulega zmniejszeniu. Stosowanie PENISPLUS+ daje rezultaty.

Udowodniono naukowo, że istnieje bezpośrednia zależność pomiędzy okresem stosowania i przyrostem długości. Pompki próżniowe niosą ryzyko powstania zakrzepu w prąciu w przypadku zbyt dużej różnicy ciśnień. Może on zostać usunięty tylko operacyjnie.

13. Czy można nosić PENISPLUS+ w nocy?

PENISPLUS+ nie powinien być noszony w nocy, ponieważ w nocy zdarzają się naturalne erekcje.

14. Co stanie się, jeżeli będę chciał nałożyć dżinsy lub inne obcisłe spodnie?

PENISPLUS+ jest niewidoczny, nawet pod dżinsami czy innymi obcisłymi spodniami. Tylko przy noszeniu kąpielówek, pas może zostać zauważony.

15. Czy istnieją jakieś działania niepożądane czy inne zagrożenia związane ze stosowaniem PENISPLUS+?

Jak do tej pory, nie stwierdzono żadnych negatywnych działań związanych ze stosowaniem PENISPLUS+. PENISPLUS+ stosowany jest na własną odpowiedzialność, ale nie ma żadnego ryzyka, jeżeli przestrzega się właściwie zaleceń. Nie należy stosować PENISPLUS+ w przypadku zakażenia, otwartej rany prącia, w przypadku słabych żył czy osłabionej struktury wewnętrznej.

Nie należy również stosować PENISPLUS+ w następujących okolicznościach:

- podczas snu, ponieważ w nocy mają miejsce naturalne erekcje,
- po wypiciu napojów alkoholowych,
- po przyjęciu leków odurzających, przeciwbólowych, tabletek nasennych i uspokajających, ponieważ zaburzają one naturalne odczuwanie bólu.

16. Czy można stosować PENISPLUS+ samemu?

Tak, każdy może zastosować PENISPLUS+ sam, bez konieczności posiadania specjalnej wiedzy.

17. Czy możliwe jest, żeby stosowanie PENISPLUS+ prowadziło do rozwoju impotencji?
NIE. Jego stosowanie prowadzi między innymi do polepszenia zdolności do erekcji.

18. Czy pas można prać?

PENISPLUS+ może być prany w temperaturze 30° Celsjusza. Wszystkie części, które wchodzi w kontakt ze skórą, zostały przebadane na obecność substancji niebezpiecznych zgodnie z normą Oekotex/100.

19. Co będzie, jeżeli jedna z części PENISPLUS+ będzie uszkodzona?

PENISPLUS+ daje roczną gwarancję na wszystkie części. Gwarancja wygasa w przypadku niewłaściwego użycia lub prania części w zbyt wysokiej temperaturze.

20. Jak stosuje się PENISPLUS+?

Prącie przekłada się przez pętlę pokrytą miękką pianką gumową. Następnie zakłada się wokół pasa pas od przodu ku tyłowi, tak aby druga jego część sięgała do pętli obejmującej ciała jamiste prącia. Potem pas mocuje się do dwóch taśm łączących w celu łatwiejszego jego założenia. Następnie ciała jamiste skręca się do boku, tak, aby dolna część ciał jamistych znalazła się na nylonowej płytce. W ten sposób pętla z medycznego silikonu, która zaciśnięta jest wokół dolnego uwypuklenia ciał jamistych jest lepiej zamocowana. Pętla jest następnie zaciskana do momentu umocowania ciał jamistych bez ich „zadzierzgnięcia”. Następnie usuwa się taśmy mocujące. Pas jest odpowiednio dociskany. Rozpoczyna się działanie wydłużające i pobudzające wzrost.

21. Czy muszę zdjąć PENISPLUS+ w celu oddania moczu?

NIE, nie trzeba zdejmować urządzenia w celu oddania moczu. Wyjmuje się tylko ciała jamiste z pętli. Dwie zastosowane taśmy mocujące w międzyczasie zapobiegają zsunięciu się pętli.

22. Czy stosowanie urządzenia jest bolesne?

Stosowanie urządzenia jest całkowicie bezbolesne, jeżeli precyzyjnie przestrzega się wskazówek.

23. Czy odczuwa się ból w trakcie erekcji przy stosowaniu PENISPLUS+?

W przypadku erekcji odczuwa się pewien nacisk w okolicy ciał jamistych.

24. Czy dzięki stosowaniu PENISPLUS+ możliwe jest wyprostowanie zakrzywionego prącia?

Ponieważ kierunek, w którym pociągany jest członek, należy zmieniać co dwa dni, jest on doskonały do leczenia zakrzywionych członków. Kierunek pociągania powinien być zawsze przeciwny do kierunku skrzywienia członka.

25. Czy PENISPLUS+ nosi się tylko po jednej stronie?

Kierunek pociągania powinien być zmieniany co dwa dni.

26. Poczynając od kiedy wydłużenie członka staje się widoczne?

Długość prącia w stanie zwiotczenia zwiększa się po około 4 tygodniach zastosowanego naciągania. Tak jak w przypadku sprężyny, prącie nie powraca do swoich oryginalnych wymiarów. Nie oznacza to jeszcze wzrostu. Jest to wynik rozciągania. Po około 3 miesiącach prącie w stanie zwiotczenia jest o około 2,1 do 3,6 cm dłuższe niż było wcześniej.

27. Jak długo czeka się na przesyłkę?

Wszystkie paczki są wysyłane natychmiast po potwierdzeniu zamówienia. Jeżeli jako forma zapłaty został wybrany przelew to po otrzymaniu wpłaty.

Paczka jest nadawana jako PRIORYTET więc dochodzi na drugi dzień od wysłania.

28. Czy paczka jest dyskretna?

Jak najbardziej. Paczka jest tak zapakowana, że nikt nie wie co jest w środku. Jest to biała duża koperta „z bąbelkami“ formatu A4. Jako nadawca wpisana jest firma New Look Consulting.

REFERENCJE

PENISPLUS+ w mediach.



Pokazy PENISPLUS+ w PRO 7 i VOX.

Podczas pokazu VOX „Wa(h)re liebe” (patrz powyżej) 21 maja 1998, jako jedyne w pozytywnym świetle urządzenie wymieniono PENISPLUS+, w porównaniu do innych urządzeń rozciągających i pompek próżniowych. Zgodnie z raportem badanych osób, było to jedyne urządzenie, które można było zastosować wygodnie i bezboleśnie, i które można niepostrzeżenie nosić pod ubraniem, ponieważ nie ma ono twardych prętów ani teleskopów. Program stacji telewizyjnej PRO 7 „Liebe Sünde” (kochane grzeszki) przedstawiło film dokumentalny, w którym urolog z Bad Wiessee, Dr Ernst pozytywnie zaopiniował PENISPLUS+. Emisja programu „Liebe Sünde” w PRO 7 miała miejsce 24 maja 1998 roku.

Także w telewizji PRO 7 w programie telewizyjnym „Taff” 27 listopada 1998 roku i 23 kwietnia 1999 roku, PENISPLUS+ został ponownie oceniony przez testujące go osoby jako „najlepsze urządzenie”. Podczas tego programu jeden szczególnie zadowolony klient opowiedział o swoim sukcesie dotyczącym wydłużania członka. 28 lutego 2000 roku w programie „Jörg Pilawa”, urządzenie PENISPLUS+ zostało zaprezentowane jako skuteczna metoda wydłużania członka.



Wielu zadowolonych klientów potwierdziło skuteczność tej metody. Do tej pory dysponujemy archiwum raportów od takich klientów, którzy stosowali PENISPLUS+ od stycznia 1998 roku. W tym okresie udokumentowano wydłużenie członka o 3.6 – 4.1 centymetra.

Referencje:

Dr Ernst, urolog z Bad Wiessee. Korzyści ze stosowania PENISPLUS+ nie pominięto w programach kanałów TV PRO 7 i VOX: PENISPLUS+ pozytywnie skomentowano w programie „Liebe Sünde” 26 czerwca 1998 i został on okrzyknięty przez testujące go osoby w programie „Wa(h)re liebe” jako „najlepsze urządzenie” w porównaniu do innych przyrządów rozciągających.

Podsumowanie

Powyższa publikacja prawdopodobnie udzieliła Ci wszelkich niezbędnych informacji. Teraz zastanów się jak ważna jest dla Ciebie wielkość Twojego penisa, jak ważna jest dla Ciebie pewność siebie i lepsze samopoczucie i wreszcie – jak ważne są dla Ciebie doznania Twojej partnerki. Jeśli masz dużo czasu – spróbuj znaleźć lepszą metodę powiększenia penisa. Kiedy będziesz już **w pełni przekonany**, że chcesz raz na zawsze poprawić jakość swojego życia seksualnego – zapraszamy na <http://www.Penis.com.pl/sklep>